




Handschuhe anlegen

Es liegt in Deinen Händen –
Infektionsprävention in der Tiermedizin



Sterile OP Handschuhe

Geschlossene Technik

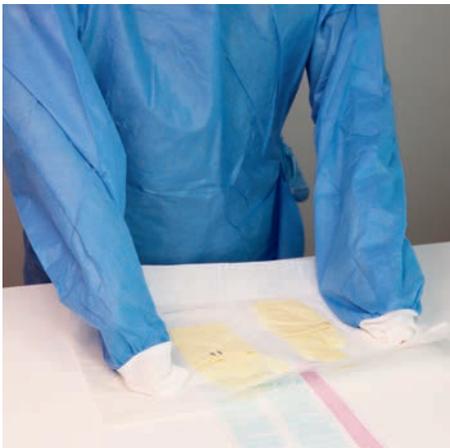


Die Arbeitsfläche wurde desinfiziert und die Handschuhe bereit gelegt. Beim Öffnen der sterilen Primärverpackung ist darauf zu achten, dass man keinen Kontakt mit dem unsterilen Untergrund bekommt.



Die rechte Handfläche zeigt nach oben, der Daumen nach außen.



Der rechte Handschuh wird von der linken Hand gegriffen, angehoben und verkehrt herum (mit den Fingern Richtung Ellbogen zeigend) auf die Handfläche gelegt.

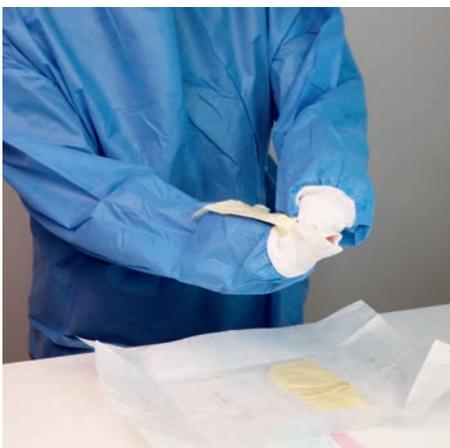

Die Handschuhmanschette wird mit dem Zeige- und/oder Mittelfinger und dem Daumen fixiert. Mit der linken Hand wird die Handschuhmanschette mit Zeigefinger und Daumen (welche durch den Ärmel bedeckt sind) gefasst.



Die Manschette wird über die Hand gezogen.



Die Hand rutscht dabei langsam in den Handschuh hinein.

Sterile OP Handschuhe

Geschlossene Technik



Handschuh und Kittel werden in Richtung Ellbogen gezogen. Hierbei rutscht die Hand weiter aus der Ärmelmanschette raus.



Nun wird dies auf der anderen Seite wiederholt. Dabei wird der linke Handschuh, mit den Fingern Richtung Ellbogen zeigend, auf die Innenfläche der linken Hand gelegt.



Die linke Hand fixiert die Handschuhmanschette und die rechte Hand zieht den Handschuh über die linke Hand.

Assistierte Technik



Der sterile Assistent hält den Handschuh an der Umschlagstelle der Handschuhmanschette auf. Die Hand gleitet in den Handschuh.



Dabei zieht der Assistent die Manschette des Handschuhes über die Manschette des Kittels.



Anschließend lässt er den Handschuh los.



Dieser Vorgang wird für die andere Hand wiederholt.

Sterile OP Handschuhe

Offene Technik



Die Arbeitsfläche wurde desinfiziert und die Handschuhe bereit gelegt (öffnen der Sekundärverpackung).



Nach der chirurgischen Händedesinfektion wird die Primärverpackung geöffnet.



Dabei muss eine Kontamination der Handschuhe unbedingt vermieden werden.



Am Umschlagpunkt der Handschuhmanschette wird der rechte Handschuh mit dem Zeigefinger und Daumen der linken Hand gegriffen.



Die rechte Hand gleitet in den Handschuh.



Auf Höhe des Handgelenkes wird die Manschette losgelassen.

Sterile OP Handschuhe

Offene Technik



Mit den Fingern der behandschuhten Hand zwischen Handschuh und Manschette gleiten und den Handschuh anheben.



Die linke Hand gleitet in den Handschuh.



Die rechte Hand zieht den Handschuhe über die linke Hand, ohne dabei selbst kontaminiert zu werden.



Mehr Informationen, dieses Poster und noch vieles mehr finden Sie unter:
www.bbraun-vetcare.de/indeinenhaenden

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | info@bbraun-vetcare.de | www.bbraun-vetcare.de

Herzlichen Dank – Die Bilder wurden mit freundlicher Unterstützung der Kleintierspezialisten Frontier GmbH in Hergolding aufgenommen.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

D-VE22041 0423/PDF/1