



Periphere Venenkatheter (VasoVet[®] / IntroVet[®])

Es liegt in Deinen Händen –
Infektionsprävention in der Tiermedizin



Periphere Venenkatheter

PVK



Durchführung Hygienische Händedesinfektion (z. B. Softa-Man® pure).




Gefäß anstauen und palpieren.



Bereich großflächig ausscheren.



Sprühdesinfektion (Softasept® N) durchführen. Mit einem sterilem Tupfer nachwischen und erneut eine Sprühdesinfektion durchführen. Einwirkzeit beachten.

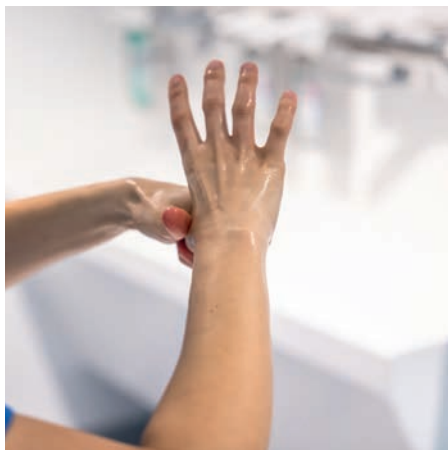

Hygienische Händedesinfektion und Untersuchungshandschuhe (z. B. Vasco® sky-blue) anziehen.



Ohne erneute Palpation das Gefäß punktieren bis der erste Flash Back zu sehen ist. Die VasoVet®/IntroVet® nun noch 1-2 mm vorschieben.



Den Katheter über die Kanüle in das Gefäß vorschieben. Dabei zeigt sich der 2. Flash-Back. Dieser ist ein Indikator dafür, dass der Katheter im Gefäß liegt.



Kanüle aus dem Katheter ziehen und den Katheter verschließen.



Den Katheter mit einem sterilen/keimarmen Pflaster (z. B. Askina® Silk) fixieren.

Periphere Venenkatheter

PVK



Die Verlängerung mit nadelfreiem Ventil (CareSite®) spülen.



Anschließend wird diese an den Katheter angeschlossen und dieser gespült.



Schutzverband (Askina® Color) anlegen und die Verlängerung mit einem sterilen Pflaster (Askina® Fix) fixieren.



Mehr Informationen, dieses Poster und noch vieles mehr finden Sie unter:
www.bbraun-vetcare.de/indeinenhaenden

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | info@bbraun-vetcare.de | www.bbraun-vetcare.de

Herzlichen Dank – Die Bilder wurden mit freundlicher Unterstützung der Kleintierspezialisten Frontier GmbH in Hergolding aufgenommen.

Die Produktmarken „Askina“, „CareSite“, „IntroVet“, „Softa-Man“, „Softasept“, „Vasco“ und „VasoVet“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.