



# Schutzkleidung im OP

Es liegt in Deinen Händen –  
Infektionsprävention in der Tiermedizin



# Chirurgisches Anziehen



Vor Betreten des OP-Bereiches werden die Hände desinfiziert und Bereichskleidung, Haube und Mundschutz angelegt.



Die Arbeitsfläche wird mit einer Wischdesinfektion vorbereitet und der OP-Kittel und die Handschuhe bereit gelegt. Dabei ist darauf zu achten, dass diese nicht in Kontakt mit der Haut oder Arbeitsfläche kommen.



Chirurgische Händewaschung (bei der ersten OP des Tages oder bei zwischenzeitlichem Verlassen des OP-Bereiches) und chirurgische Händedesinfektion.



Die sterile Primärverpackung wird, ohne den Kittel zu berühren geöffnet.



Die Hände können mit dem sterilen Handtuch, welches im Paket enthalten ist, nach Vollendung der Einwirkzeit final abgetrocknet werden.



Die Kittel sind so gefaltet, dass die Innenseite nach außen zeigt. Mit den Fingern links und rechts in die Ärmel schlüpfen und vom Tisch wegtreten.

# Chirurgisches Anziehen



Der Kittel soll sich langsam nach unten entfalten.



Nach vollständiger Entfaltung werden die Arme weiter vorgeschoben.



Die Hände bleiben dabei immer innerhalb des Kittels.



Eine weitere Person greift sich die Innenseite des Kittels, zieht diesen über die Schultern und verschließt den Kittel am Hals.



An der Innenseite des Kittels sind zwei weitere Schleifenbänder, die durch die Hilfsperson geschlossen werden.



Das Taillenband wird erst nach dem Anlegen der sterilen Handschuhe geschlossen.



Das Band wird von der grünen Karte entfernt und vom Chirurgen weiter fest gehalten.



Der grüne Teil wird dem Assistenten gereicht.



Der Chirurg dreht sich dann vorsichtig um sich selbst.

# Chirurgisches Anziehen



Das Band wird dann aus der Papierschleife gezogen.



An der Seite werden beide Bänder zu einer Schleife fixiert.



Der Chirurg ist nun fertig für die OP.



Mehr Informationen, dieses Poster und noch vieles mehr finden Sie unter:  
[www.bbraun-vetcare.de/indeinenhaenden](http://www.bbraun-vetcare.de/indeinenhaenden)

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | [info@bbraun-vetcare.de](mailto:info@bbraun-vetcare.de) | [www.bbraun-vetcare.de](http://www.bbraun-vetcare.de)

Herzlichen Dank – Die Bilder wurden mit freundlicher Unterstützung der Kleintierspezialisten Frontier GmbH in Hergolding aufgenommen.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden.  
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

D-VE22041 0423/PDF/1