

Sterofundin ISO B. Braun Vet Care
Infusionslösung für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen,
Schweine, Hunde und Katzen

Sterofundin ISO B. Braun Vet Care

500 ml
1.000 ml enthalten
Natriumchlorid 6,80 g
Kaliumchlorid 0,30 g
Magnesiumchlorid-Hexahydrat 0,20 g
Calciumchlorid-Dihydrat 0,37 g
Natriumacetat-Trihydrat 3,27 g
L-Asparaginsäure (E298) 0,67 g
Theoretische Osmolalität 300m Osm/l
Dichte 1,010 g/ml
pH 5,1 - 5,3
Elektrolytkonzentrationen:
Natrium 145,0 mmol/l
Kalium 4,0 mmol/l
Magnesium 2,5 mmol/l
Calcium 127,0 mmol/l

ACTIV 340 mmol/l
MAK 3,6 mmol/l
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage
Intravenöse Anwendung
Wärmestabile, Null-Tartrate
Essigsäure, Null-Systein
Misch
Sofort verbrauchbar, nicht
aufbewahren.
Nicht im Kältebereich lagern
oder einfrieren.
Einhängung: Lesen Sie vor der
Anwendung die Packungs-
beilage.
Für Tiere
DE: Verschreibungsstoff (VgV)
Zul.-Nr.: 40262.00.00
AT: Rezept- und apotheken-
pflichtig
Zul.-Nr.: 839833

Vorbereitung Infusion (Intrafix® SafeSet)

Es liegt in Deinen Händen –
Infektionsprävention in der Tiermedizin

Vorbereitung Infusion



Arbeitsfläche (z. B. Meliseptol® acute) und Hände desinfizieren (Softa-Man® pure).



Arbeitsutensilien vorbereiten. Infusion beschriften. Schutzfolie entfernen ggf. eine Sprüh- oder Wischdesinfektion des Gummistopfens durchführen.



Mit dem Spike des Intrafix® SafeSets den Gummistopfen durchstechen (dabei nicht rotieren).



Rollklemme schließen und die Tropfkammer füllen. Elektrolytlösungen 1/3-1/2; Transfusionen > 2/3. Bei der Verwendung von Intrafix® SafeSet einige Sekunden warten, damit sich der AirStop-Filter entfalten kann.



Die Rollklemme öffnen und die Leitung füllen.




Bei der Verwendung vom Intrafix® SafeSet muss der Verschluss, aufgrund der PrimeStop-Membran nicht abgenommen werden, so dass der Luer-Lock Ansatz steril bleibt.




Rollklemme schließen.

Vorbereitung Infusion

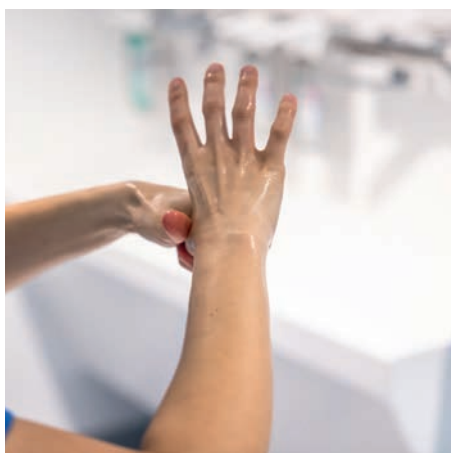

Hygienische Händedesinfektion durchführen.

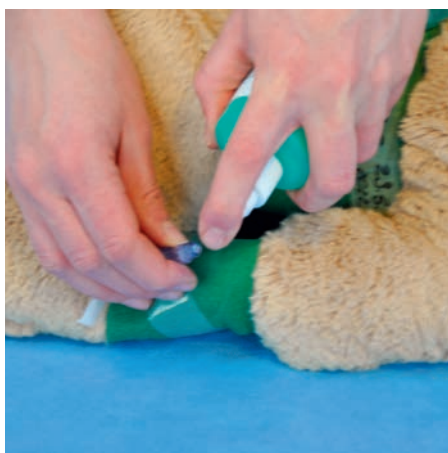

Wisch- oder Sprühdesinfektion des CareSite®-Ventil durchführen.



Infusion anschließen.



Mehr Informationen, dieses Poster und noch vieles mehr finden Sie unter:
www.bbraun-vetcare.de/indeinenhaenden

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | info@bbraun-vetcare.de | www.bbraun-vetcare.de

Herzlichen Dank – Die Bilder wurden mit freundlicher Unterstützung der Kleintierspezialisten Frontier GmbH in Hergolding aufgenommen.

Die Produktmarken „CareSite“, „Intrafix“, „Meliseptol“ und „Softa-Man“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG.
Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.