



B. BRAUN VET CARE

ON-Q[®]

DAS SYSTEM FÜR DIE KONTINUIERLICHE WUNDINFUSION

Das ON-Q® System

DAS ON-Q® SYSTEM IM SCHMERZTHERAPEUTISCHEN PROZESS

Als fester Bestandteil des schmerztherapeutischen Prozesses unterstützt das Wundinfusionssystem ON-Q® unsere Kunden seit vielen Jahren bei ihrer täglichen Arbeit. Dabei verlassen sie sich auf das bewährte System aus effizienter Pumpentechnologie und effektiver Katheterbauweise.

DER FLUSSBEGRENZER

- Reguliert die Fließgeschwindigkeit
- Wird während der Applikation auf die Haut geklebt
- Keine Manipulation durch den Patienten möglich (bspw. Einstellen einer anderen Flussrate)

DIE SCHLAUCHKLEMME

- Zum Anhalten/Schließen der Infusion

DER SOAKER KATHETER

- Spezielle Dochttechnologie: In den Katheter ist ein Docht eingearbeitet, der das Lokalanästhetikum aufsaugt und gleichmäßig über den jeweiligen Infusionsabschnitt an das Gewebe abgibt

DER PUMPENKÖRPER

- Elastomeres Dreischichtsystem für eine präzise und einfach zu handhabende Funktionsweise
- Erhöhung des Tragekomforts für den Patienten durch eine weiche und runde Oberfläche der Pumpe
- Der Pumpenkörper wird vor der Katheteranlage zumeist von Hand befüllt. Die dabei gedehnten Membrane ziehen sich wieder zusammen und drücken somit die Flüssigkeit im Inneren in das Schlauchsystem


DER FILTER

- Verhindert die Passage von Partikeln und scheidet potentiell eingetretene Luft ab



ANWENDERVORTEILE

- Umfangreiches Portfolio für die kontinuierliche Wundinfusion
- Silberbeschichtete Katheter
- Geschlossenes System durch elastomere Pumpe und Wundinfusionskatheter
- Doppelkathetersystem zur parallelen Infusion in mehreren Schichten/Bereichen
- Tunneler zur Katheterplatzierung an empfindlichen Strukturen

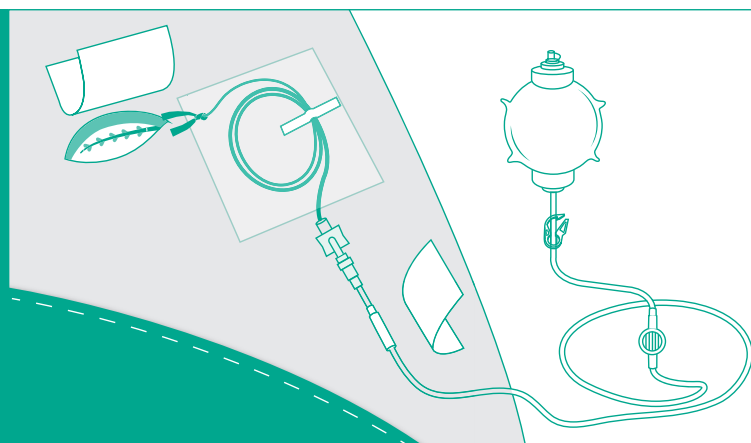

KONTAKT

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Tel. +49 (0) 7461 95-2191 | www.bbraun-vetcare.de
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst.