


Einwegtuchspender zum Befüllen mit verschiedenen Desinfektionsmitteln

Hinweise zur Anwendung

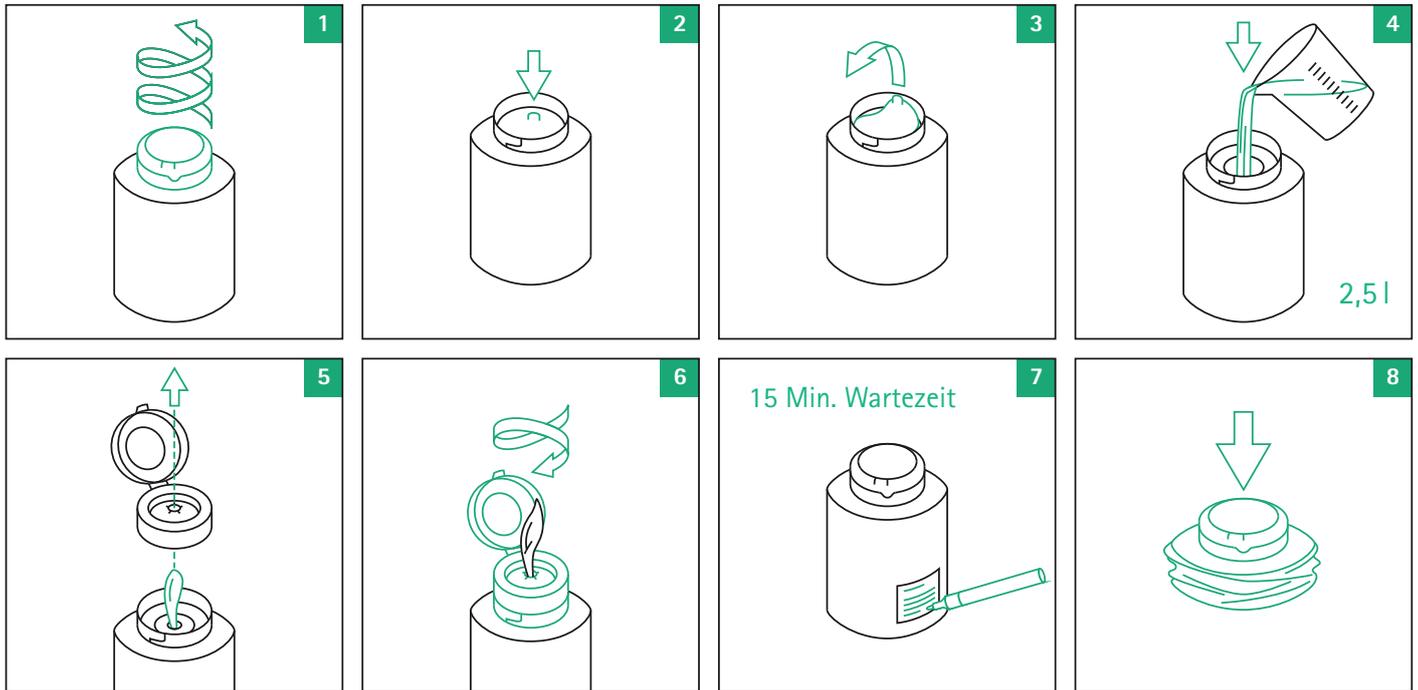

Anwendungsbereiche

Mit dem B. Braun Wipes Basic Bag Einwegtuchspendersystem können Vliestücher mit Flächendesinfektionsmittel getränkt, hygienisch gelagert und verwendet werden. Diese Tücher können zur Reinigung und Desinfektion aller Arten von medizinischen Geräten und Flächen verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

Der B. Braun Wipes Basic Bag ist bereits mit einer Rolle trockener Vliestücher vorgefüllt. Sie können nun ein Desinfektionsmittel, das Sie in den Beutel füllen möchten, auswählen:

- 1 2,5 Liter Anwendungslösung des Desinfektionsmittels Ihrer Wahl vorbereiten (Angaben zur Anwendungskonzentration und Einwirkzeit beachten).
- 2 Schutzkappe des Vliestuchspenders öffnen.
- 3 Beide Teile der Membran öffnen, die die Versiegelung bilden.
- 4 2,5 Liter Desinfektionsmittellösung einfüllen.
- 5 Oberstes Tuch durch die ankerförmige Öffnung des Spenders fädeln.
- 6 Das erste Tuch herausziehen und entsorgen.
- 7 Alle Dokumentationsfelder auf dem Etikett ausfüllen.

Nach einer 15-minütigen Vortränkzeit ist das System einsatzbereit. Eine Befüllungsanleitung ist auf Anfrage erhältlich.

Lieferform	Verkaufseinheit	Art.-Nr.	PZN
Basic Bag mit 120 Tüchern	4 x 1 Rolle	180357	19192870