

# Aesculap® AdTec® bipolar

Anleitung zur Demontage und Montage



Aesculap Endoscopic Technology

## Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf  
Tel. +43 2236 4 65 41-0 | Fax +43 2236 4 65 41-177 | [www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)

## Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | 6204 Sempach  
Tel. +41 58 258 50 00 | Fax +41 58 258 60 00 | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland  
Tel. (0 74 61) 95-0 | Fax (0 74 61) 95-26 00 | [www.aesculap.de](http://www.aesculap.de)

Aesculap – a B. Braun company

Die Hauptproduktmarke Aesculap und die Produktmarke AdTec sind eingetragene Marken der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Prospekt Nr. C22301

1111/1.0/2




## DEMONTAGE



### 1. Schaft und Griff trennen

Drehstern nach hinten ziehen und in dieser Position halten.

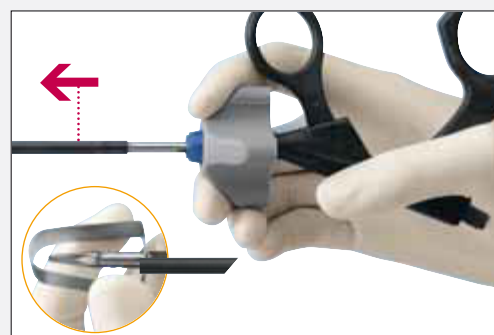

### 2. Schaft aus Griff entnehmen


Mauleinsatz an der Schutzkappe festhalten und aus dem Griff ziehen.

**Wichtig:** Bewegliches Griffteil nicht festhalten.



### 3. Griff demontieren

Grauen Drehstern nach vorne vom Griff abziehen.

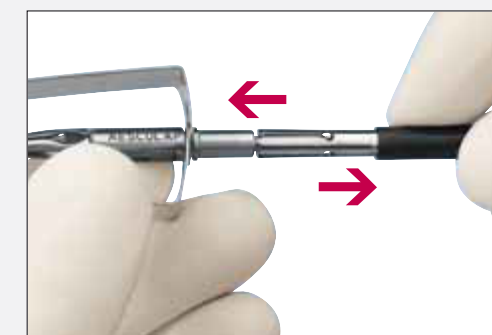

### 4. Schaft demontieren I


Mauleinsatz an der Schutzkappe festhalten und schwarzes Außenrohr abziehen.



### 5. Schaft demontieren II


Mauleinsatz an der Schutzkappe festhalten und Metall-Innenrohr abziehen.

## MONTAGE

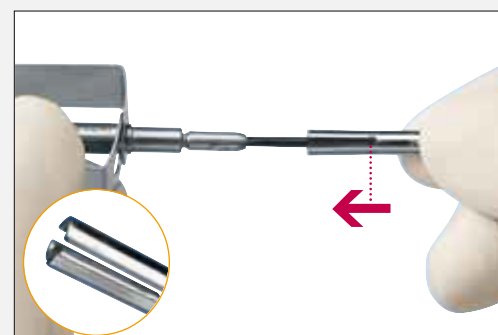


### 1. Schaft montieren I

Metall-Innenrohr mit den vier Federungen in Richtung Arbeitsende auf den Mauleinsatz aufschieben, bis die Federungen einrasten.

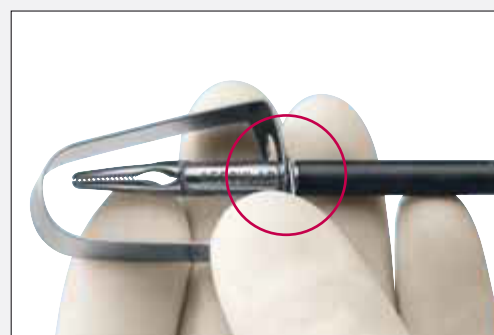


### 2. Schaft montieren II

Schwarzes Außenrohr bis zum Anschlag über das Innenrohr auf den Mauleinsatz schieben.

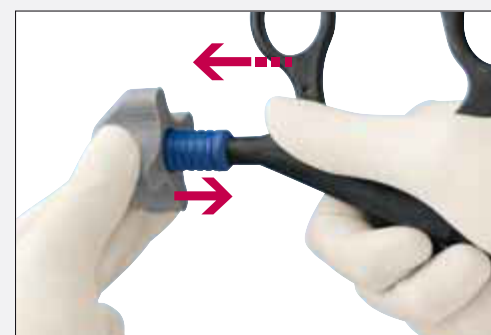

### 3. Vorbereitung Handgriff

Grauen Drehstern von vorne auf den Griff aufschieben. Bewegliches Griffteil in vordere Position bringen.

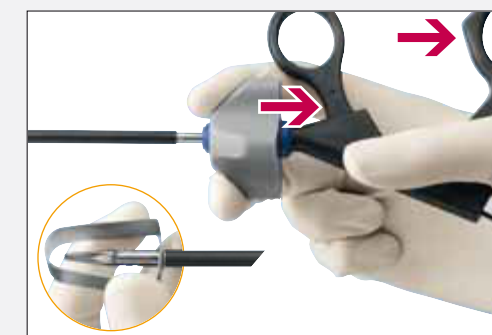

### 4. Schaft und Griff zusammensetzen

Drehstern nach hinten ziehen und halten. Schaft an der Schutzkappe festhalten und in den Griff schieben. Drehstern loslassen – er bewegt sich nach vorne. **Wichtig:** Das bewegliche Griffteil nicht festhalten



### 5. Funktionstest

Den Griff öffnen und schließen, dabei überprüfen ob sich die Maulteile öffnen und schließen.

## PFLEGE



**Instrumente nach jeder Reinigung mit Aesculap Sterilit an den definierten Stellen (Maulteil und bewegliches Griffteil) ölen.**



- 1 Schutzkappe
- 2 Drehstern
- 3 Bewegliches Griffteil



## AUFBEREITUNG & ZUBEHÖR

- Kontaminiertes Produkt schnellstmöglich aufbereiten
- Das Produkt kann sowohl im zerlegten als auch zusammengebauten Zustand sterilisiert werden
- Für Hinweise zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung **Empfehlung:** Für eine effektive Reinigung speziell der Maulteile – B. Braun Stabimed®
- Aktuelle Informationen zur Aufbereitung siehe auch Aesculap Extranet unter [www.aesculap-extra.net](http://www.aesculap-extra.net)
- Zubehör und Ersatzteile siehe Prospekt C758 oder unter [www.endoskopie-katalog.de](http://www.endoskopie-katalog.de)

## REPARATUR

Reparaturen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die von Aesculap hierzu ermächtigt wurden. Nur so bleiben Garantie und Gewährleistungsansprüche uneingeschränkt erhalten.

Bei Reparaturen einschicken an:  
Aesculap Technischer Service  
Am Aesculap-Platz  
D-78532 Tuttlingen.

Weitere Serviceadressen erfahren Sie über die oben genannte Adresse und über [ats@aesculap.de](mailto:ats@aesculap.de)