

Infusomat® Space

KURZ-GEBRAUCHSANWEISUNG



INBETRIEBNAHME UND INFUSIONSBEGINN

1. Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.
2. Um mit der direkten Eingabe der Therapieparameter zu beginnen drücken Sie  oder mit  und  die Pumpentür öffnen, um mit dem Einlegen der Leitung fortzufahren.
3. Infusionsleitung von rechts nach links gerade einlegen.
Zuerst Leitung durch Upstreamsensor führen.
Danach zweilöchrigen Clip einlegen.
Dann, ohne dabei die Leitung zu verdrehen, den weißen Clip fixieren. Leitung in den Luftsensor drücken.
4. Die Freeflow-Klemme in gekennzeichnetener Pfeilrichtung in den geöffneten Schlitz einschieben, bis der Entriegelungshebel schließt und die Sicherheitsklemme die Leitung zusammen-drückt (blinkende Warnleuchte erlischt).
5. Therapieparameter eingeben und die Infusion durch Drücken von  starten.



FÖRDERRATE ÄNDERN

1. Stoppen Sie die Pumpe mit  und wählen Sie die Rate mit  im Hauptmenü aus.
2. Die Rate mit  anwählen und mit  die neue Rate eingeben.
3. Drücken Sie , um die Infusion mit geänderter Rate zu starten.

Hinweis: Um die Förderrate während der Infusion zu ändern, drücken Sie , geben Sie die neue Rate mit  ein und bestätigen Sie diese mit , um mit der neuen Förderrate fortzufahren.

INFUSIONSLEITUNGSWECHSEL UND NEUER THERAPIESTART

1. Drücken Sie , um die Infusion zu stoppen und unterbrechen Sie die Patientenverbindung.
2. Drücken Sie , um die Pumpentür mit  zu öffnen.
Den grünen Entriegelungshebel vollständig bis zum Einrasten herunterdrücken, Leitung entnehmen und neue Leitung einlegen.
3. Schließen Sie die Pumpentür, bestätigen Sie die Leitung mit  und öffnen Sie die Rollenklemme.
4. Entlüften Sie gegebenenfalls mit  und drücken Sie dann , um fortzufahren. Stellen Sie die Patientenverbindung her und prüfen Sie die Therapieparameter mit .
5. Fahren Sie durch Drücken von  mit der Therapie fort.

Hinweis: Während der Infusion kann jederzeit mit einer neuen Therapie begonnen werden. Befindet sich die Pumpe im Haupt-, Status- oder Optionsmenü, (wiederholt)  drücken und den Anweisungen folgen.

BOLUSGABE

Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten der Bolusgabe:

1) Manueller Bolus:

 drücken. Danach halten Sie  gedrückt. Es wird solange Flüssigkeit gefördert, wie Sie die  Taste gedrückt halten.

2) Bolus mit Volumenvorwahl:

 drücken. Anschließend  drücken und Boluslimit mit  wählen. Zum Bestätigen und Starten des Bolus  drücken.

3) Bolus mit Ratenberechnung:

 drücken. Drücken Sie , um die Boluslimit mit  einzugeben. Mit  bestätigen. Zeit, in der der Bolus verabreicht werden soll, mit  wählen.

 drücken, um angezeigten Bolus zu bestätigen und zu starten.

Hinweis: Der Bolus kann jederzeit mit  abgebrochen werden.

Die „Medikamentendatenbank“ ist eine Sonderfunktion, die über das Hauptmenü zu erreichen ist. Alternativ startet die Pumpe mit der Frage nach der Medikamentendatenbank nach dem Einschalten.

MEDIKAMENTENDATENBANK

1. Datenbank durch bestätigen mit  öffnen.
2. Durch Kategorieliste mit  navigieren und aus Liste oder innerhalb einer Kategorie das Medikament mit  anwählen.
3. Gegebenenfalls angezeigte Medikamenteninformation mit  bestätigen.
4. Prüfen, ob Medikamentenkurzname mit dem ausgewählten Medikament übereinstimmt. Die Parameter im Hauptmenü durch Drücken von  kontrollieren und Infusion mit  starten.

HINWEIS: Der Anwender muss sich vor dem Therapiestart vergewissern, dass die in der Pumpe hinterlegte Medikamentendatenbank mit der zu behandelnden Patientenzielgruppe übereinstimmt. Die Bezeichnung der Medikamentendatenbank wird an der Pumpe angezeigt.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten die Medikamentendatenbank in die Therapie einzubinden.

Diese können sowohl während einer Förderung als auch im Stop-Zustand der Pumpe vorgenommen werden.