


B. Braun Wipes

Nachfüllbarer Vliestuchspender

EIGENSCHAFTEN

- Nachfüllbarer Vliestuchspender zum Befüllen mit ca. 2,5 Liter Desinfektionsmittellösung
- Bequeme Entnahme der einzeln abreißbaren B. Braun Wipes
- Wiederverschließbarer Deckel schützt vor Kontamination und Verdunsten der Lösung
- Fusselfreie Tücher (Größe 19 x 36 cm), die den Desinfektionswirkstoff sicher an die zu desinfizierende Fläche abgeben
- Synthetisches Vliesmaterial (100% PET)
- Mit B. Braun Flächendesinfektionsmitteln geprüft
- B. Braun Wipes, Vliesrolle mit 100 Tüchern in Premiumqualität (65 g/m²), sehr weich und saugfähig
- B. Braun Wipes ECO, Vliesrolle mit 120 Tüchern, gute Tuchqualität (50 g/m²)

HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND DOSIERUNG

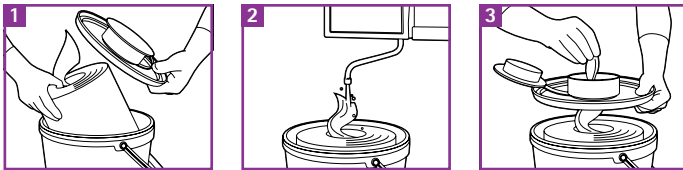

- 1** Handschuhe tragen; Vliestuchrolle einsetzen
- 2** Circa 2,5 Liter gebrauchsfertige Lösung einfüllen und von der Mitte nach außen über die Vliesrolle gießen; 10 Min. warten, bis die Vliesrolle vollständig durchtränkt ist
- 3** Vliestuch durch den Deckel führen; das erste Tuch werfen; Deckel immer unmittelbar nach Tuchentnahme wieder verschließen; Aufkleber (liegt jeder Tuchrolle bei) beschriften und aufkleben

B. BRAUN PRODUKT	MINDEST-KONZ.	HALTBARKEIT DER ANGESETZTEN GEBRAUCHSLÖSUNG
Hexaquant® pure	0,5%	4 Wochen
Hexaquant® XL	1,0%	4 Wochen
Hexaquant® plus lemon fresh	0,5%	4 Wochen
Melsept® SF	1,0 %	4 Wochen (B. Braun Wipes ECO) 2 Wochen (B. Braun Wipes)
Meliseptol®	konz.	4 Wochen
Meliseptol® rapid	konz.	4 Wochen
Meliseptol® Foam pure	konz.	4 Wochen

praktisch und wirtschaftlich



WEITERE HINWEISE

Wenn alle Vliestücher aufgebraucht sind oder das Haltbarkeitsdatum der gebrauchsfertigen Lösung erreicht ist, kann das Spendersystem neu befüllt werden. Vorher alle Oberflächen des B. Braun Wipes Spendersystems gründlich reinigen, desinfizieren und trocknen lassen. Detaillierte Angaben zur Aufbereitung siehe Praxistipp „Einsatz und Aufbereitung der B. Braun Wipes Spendersysteme“.

GEPRÜFTE B. BRAUN DESINFIZIATIONSMITTEL

Die in der Tabelle gelisteten B. Braun Produkte sind mit dem B. Braun Wipes Spendersystem geprüft. B. Braun Wipes Vliestücher lagern den Desinfektionswirkstoff nicht an, sondern geben ihn an die zu desinfizierende Fläche ab.

Das eingefüllte Desinfektions- und/oder Reinigungsmittel muss mit dem B. Braun Wipes Spendersystem sowie den B. Braun Wipes Vliesrollen kompatibel sein. Lassen Sie sich die Kompatibilität vom Hersteller der Desinfektions- und Reinigungsmittel bescheinigen.

LIEFERFORM	VE	Art.-Nr.	PZN
Spendersystem mit grauem Deckel (ohne Vliesrolle)	4	19873	06067637
Vliesrolle B. Braun Wipes 100 Tücher	6	19164	06067643
Vliesrolle B. Braun Wipes ECO 120 Tücher	6	19726	10329126