


Helimatic® Cleaner MA

Mildalkalischer Reiniger zur maschinellen Aufbereitung

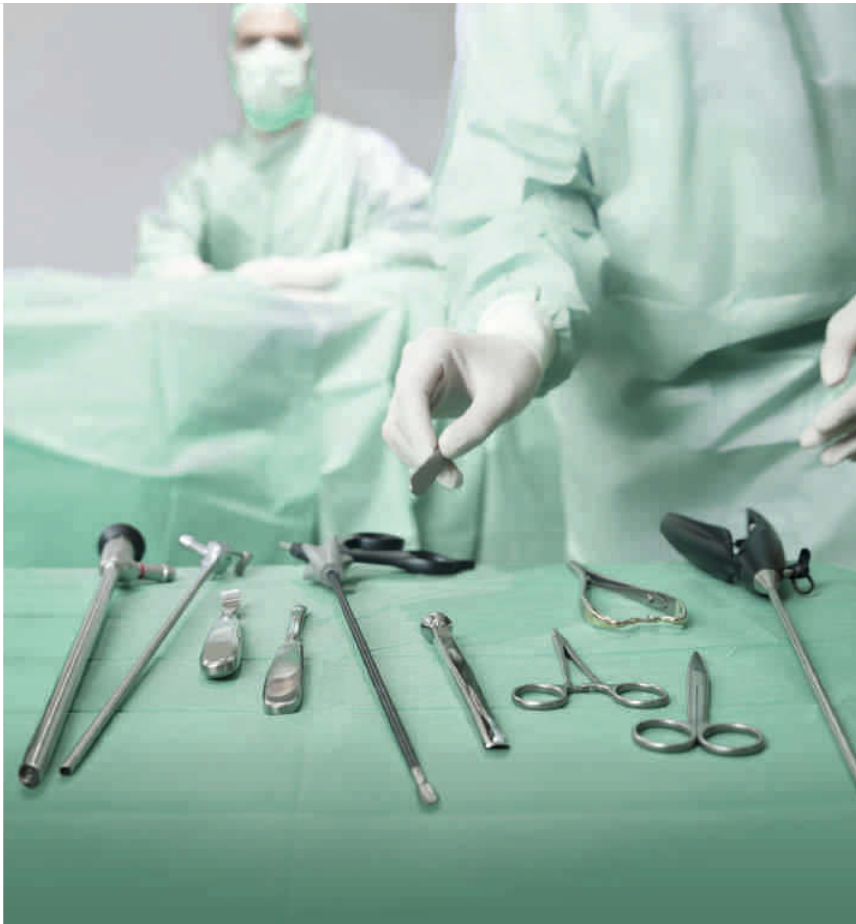

Hygiene

NEU

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Helimatic® Cleaner MA

... kraftvoll und schonend

Helimatic® Cleaner MA ist ein mildalkalischer Flüssigreiniger für chirurgische Instrumente und Edelstahlgeräte, Anästhesiezubehör, Babyflaschen, Kunststoffbehälter, flexible und starre Endoskope, MIC-Instrumente, Laborglas und OP-Schuhe

Besondere Reinigungsleistung auf Basis von Alkalien, Tensiden und Enzymen

Entfernt hervorragend angetrocknete und denaturierte Blutrückstände

Zugeschnitten auf die neuen Herausforderungen in der hygienischen Sicherheit und gleichzeitig schonend gegenüber empfindlichen Instrumenten und Materialien

Entfernt zuverlässig Proteine, Lipide, Körperflüssigkeiten sowie andere organische Substanzen und verhindert die erneute Ablagerung

Frei von Phosphaten und Silikaten

Mit Korrosionsinhibitoren

Schaumarm auch bei hoher organischer Belastung

Geeignet für alle gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräte





+ keine Neutralisation notwendig, pH > 10

Anwendung und Dosierung

- Einsatz und Dosierung von Helimatic® Cleaner MA müssen, u. a. von den Aufbereitungsanforderungen und Verschmutzungsgrad der Instrumente abhängig, festgelegt werden.
- Programmwahl und Dosierung in einem automatischen Reinigungs- und Desinfektionsgerät sind sorgfältig abzustimmen und in Bezug auf Materialverträglichkeit zu prüfen, ehe das Verfahren für die routinemäßige Instrumentenaufbereitung freigegeben werden kann.
- Helimatic® Cleaner MA kann ohne Neutralisationsschritt eingesetzt werden, dadurch kürzere Programmabläufe.
- Helimatic® Cleaner MA und Helimatic® Disinfectant bilden ein perfekt abgestimmtes Duo für die maschinelle Reinigung und Desinfektion flexibler Endoskope und thermolabiler Instrumente.

Beispiele für Prozessparameter

	Konz.		
Thermostabile und thermolabile Instrumente	0,2–1,0% (2–10 ml/l)	50–60 °C	10 Min.
Flexible Endoskope	0,5% (5 ml/l)	50 °C	7 Min.

Produkt	VE	Art.-Nr.	PZN
Helimatic® Cleaner MA	5 Liter-Kanister	19678	07477194
	10 Liter-Kanister	19679	07477202
	200 Liter-Fass	auf Anfrage	
Kanisterschlüssel für 5 Liter-Kanister	1 Stück	3908187	–



Helimatic® Cleaner alkalisch

Zusammensetzung

< 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Polycarboxylate, < 5 % Phosphonate, Korrosionsinhibitoren, Enzyme, Hilfsstoffe in alkalischer Formulierung.

Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien

< 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphonate, < 5 % Polycarboxylate

Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung

Enthält Subtilisin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit reichlich Wasser ausspülen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Produktreste und Behälter müssen sicher entsorgt werden. Beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt beiziehen und nach Möglichkeit das Produktetikett vorzeigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sicherheitsdatenblatt für professionelle Anwender auf Anfrage erhältlich.

Physikalisch-chemische Daten

pH-Wert (20 °C):
Dichte (20 °C, g/cm³):
Aussehen

Konzentrat

ca. 10,5
ca. 1,09
klar, klar bräunlich

Gebrauchsfertige Lösung

ca. 10