

Infusionsbestecke

Praxistipp / Handhabungshinweis



Manuelle Belüftung mit Schnappverschluss

Die Belüftungsklappe ist produktionsseitig geschlossen und ist in den folgenden Anwendungssituationen geschlossen zu halten:

Anwendungssituation

Vorbereitung der Infusion:
Anstechen des Behälters
in senkrechter Position und
Entlüftung der Verbindungs-
leitung

Durchführung der Infusion

Infusionsunterbrechungen:

- Zuspritzen
- Umbetten/Transport des Patienten
- Umstecken des Infusionsgerätes

Kollabierbare Infusionslösungsbehälter

Belüftungsklappe bleibt geschlossen

Belüftungsklappe bleibt geschlossen

Belüftungsklappe bleibt geschlossen bzw. ist unbedingt vor der Unterbrechung zu schließen, um die Funktion der Belüftung zu gewährleisten

Starre Infusionslösungsbehälter und Glasbehälter

Belüftungsklappe wird erst nach dem Einstellen des Flüssigkeitsspiegels geöffnet und bis zum Anlegen der Infusion geschlossen


Belüftungsklappe ist offen

Belüftungsklappe ist unbedingt vor der Unterbrechung zu schließen, um die Funktion der Belüftung zu gewährleisten


Aufbau der unterschiedlichen Filtermembrane

Die innovative AirStop-Membran in der Tropfkammer ist anders aufgebaut als die Flüssigkeitsfilter herkömmlicher Infusionsbestecke:

Herkömmlicher 15-µm-Filter

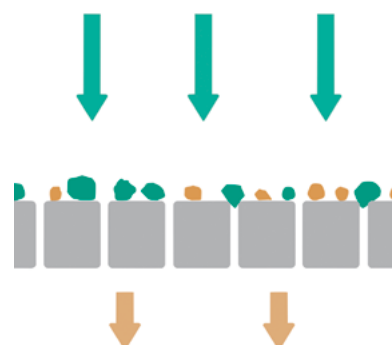

AirStop-Membran

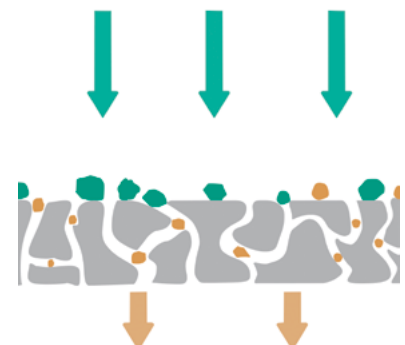

Ihre Vorteile

- Schutz vor dem Eindringen von Luft in die Infusionsleitung* und Reduzierung der Infektionsgefahr
- Zeit- und Kostenersparnis durch problemloses Umstecken bei kompatiblen Lösungen

* Bitte allgemeine Sicherheitsvorkehrungen beachten. Bei Massenfertigungsprodukten können Funktionsabweichungen gemäß derzeitigem Stand der Technik nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Welche Möglichkeit besteht, wenn die Infusion nicht läuft?

Durch die Konstruktion der Membran wird Luft sicher zurückgehalten und der Spiegel sinkt nicht unter das Niveau des Tropfkammerbodens. Um die Infusionsleitung zu befüllen, kann es notwendig sein, einen der folgenden Hinweise zu beachten:

Wichtig:
bei allen Manipulationen ist die Belüftungsklappe geschlossen zu halten!

Ausnahme:
Bild 4, bei der Verwendung von Glasflaschen.

