



Medikamenten Applikation (Injekt® / MiniSpike® 2)

Es liegt in Deinen Händen –
Infektionsprävention in der Tiermedizin



Hautantisepsis

Wischdesinfektion



Wischdesinfektion der Arbeitsflächen, hygienische Händedesinfektion (Softa-Man® pure), ggf. Handschuhe (je nach Medikament).



Arbeitsutensilien vorbereiten. Wisch- oder Sprühdesinfektion der Gummistopfen oder MiniSpike®s.




Bei der Verwendung eines MiniSpike® 2, Spritze fest auf das Ventil stecken, dann Medikament und Spritze (Injekt®) umdrehen und das Medikament aufziehen.



Injekt®-Spritze mit einem sterilen Kombi-Stopper verschließen.



Das Medikament in einer desinfizierten Nierenschale zum Patienten transportieren.

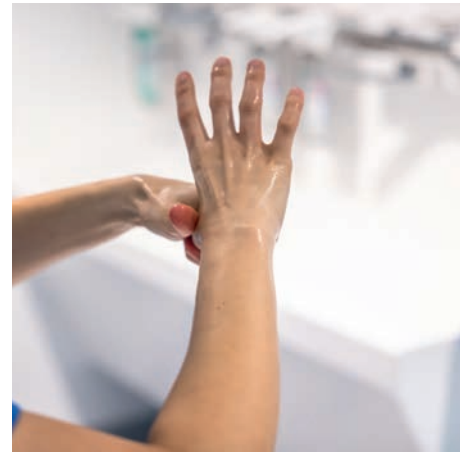

Bei der Applikation von Medikamenten handelt es sich um eine aseptische Tätigkeit und sie bedarf der hygienischen Händedesinfektion.

Hautantisepsis

Wischdesinfektion



Vor der Medikamentenapplikation eine Wisch- oder Sprühdesinfektion des CareSite® Ventils durchführen.



Applikation des Medikamentes und Nachspülen mit steriler 0,9% NaCl Lösung.



Mehr Informationen, dieses Poster und noch vieles mehr finden Sie unter:
www.bbraun-vetcare.de/indeinenhaenden

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | info@bbraun-vetcare.de | www.bbraun-vetcare.de

Herzlichen Dank – Die Bilder wurden mit freundlicher Unterstützung der Kleintierspezialisten Frontier GmbH in Hergolding aufgenommen.

Die Produktmarken „CareSite“, „Injekt“, „MiniSpike“ und „Softa-Man“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG.
Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.