

Histoacryl® Flexible

Die fortschrittliche Wahl für den Wundverschluss der Haut

Topischer Hautkleber für den Verschluss kurzer und langer Inzisionen **bis zu 25 cm** (1-3).
Bestehend aus Butyl-Cyanoacrylat (NBCA) und einem Weichmacher, der zusätzliche Flexibilität gewährleistet (2, 3).



Hohe Patientenzufriedenheit
Weniger Schmerzen und kürzere
Genesungszeit als bei Nahtmaterial (4).



Zeitersparnis
Verkürzte Hautverschlusszeit
im Vergleich zu Nähten (5).




Mikrobielle Barriere
Schutzwirkung für bis zu 7 Tage (6, 7).



Sichere und effiziente Polymerisation
Polymerisationszeit ca. 30 Sekunden,
Anwendung in einer Schicht (5).




Gebrauchsfertig
Lagerung bei
< 25 °C möglich.

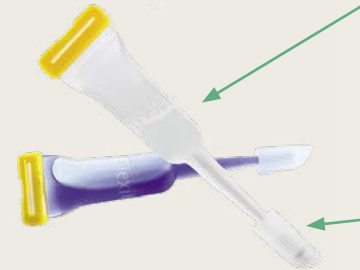

Erhältlich in
zwei Varianten:
Blau & Ungefärbt


Spezielle Applika-
torspitze für eine
präzisere und
komfortablere
Anwendung

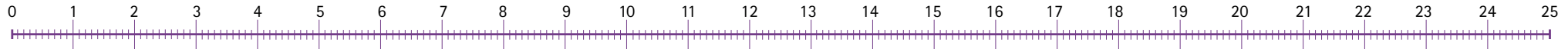

Anwendung Histoacryl® Flexible




1. Ampulle durch Abdrehen der Spitze öffnen.

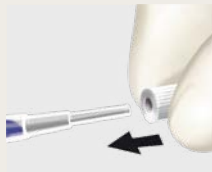


2. Applikatorspitze aufsetzen.



3. Wundränder adaptieren.

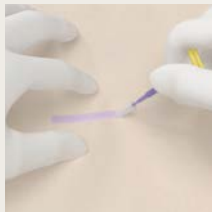

4. Eine dünne Schicht Kleber auftragen.

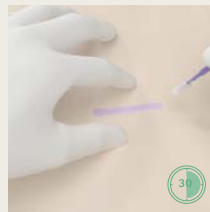

5. Wundränder 30 Sekunden halten.

Nach der Anwendung



Kein Verband erforderlich (5)



Duschen erlaubt (5)



Kein Entfernen notwendig:
löst sich nach 4–8 Tagen
selbstständig

Referenzen

- (1) Internal report_RDR/DID/CHM/DCE/16106
- (2) Report ECT / Dr. Gabriel Siedle
- (3) Frey-Tox Report / Lab.- Nr. 03145
- (4) Dasrilsyah RA et al. J Obstet Gynaecol. 2021;41(2):242–7.
- (5) Witting S et al. Dtsch Arztebl Int. 2021;118(44):749–55.
- (6) Internal Report_MDT medical device testing GmbH report / Project12m020 /
- (7) Internal Report_MDT microbial device testing GmbH report / Project 13m155 /

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel.: (0 56 61) 9147-70 00
E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Tuttlingen | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen

Hersteller nach MDR (EU) 2017/745:

Histoacryl®:

B. Braun Surgical, S.A. | Carretera de Terrassa, 121 | 08191 Rubí | Spanien

Nr. 4008583 Stand: 08/2026

